

КАК СОЗДАТЬ СВОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АККАУНТ В DIAGNOCAT

1. Если вы заказываете КТ через диагностический центр, то в направлении вы ставите галочку «Diagnocat», указываете какие дополнительные отчеты вам нужны (Эндодонтический, Имплантологический, Третьи моляры, STL) и указываете соответствующие номера зубов.
Например: Эндодонтический отчет 36, 35, 21. Имплантологический отчет 46,45,44. Третьи Моляры 18,28,38,48.
2. Вы получаете ссылку на личный кабинет «Диагнокат» в виде ссылки из письма в вашем электронном ящике. Далее вы нажимаете «Перейти в Диагнокат».



Вам был предоставлен доступ к профилю пациента.


Someone ([redacted]) поделился с вами профилем пациента:

[redacted]

Теперь вы можете просматривать этот профиль в вашем аккаунте Diagnocat.

[Перейти в Diagnocat](#)

3. Если вы до этого ни разу не пользовались сервисом, то на стартовом окне нажмите «Создать учетную запись». Логин – это ваша электронная почта, на которую пришло письмо, пароль – придумайте сами. Нажимаете «Создать учетную запись», и вы попадаете в личный кабинет, где находится рентгенологический и другие отчеты Вашего пациента. **!!! Важно:** создать личный кабинет вы можете только с персонального компьютера.

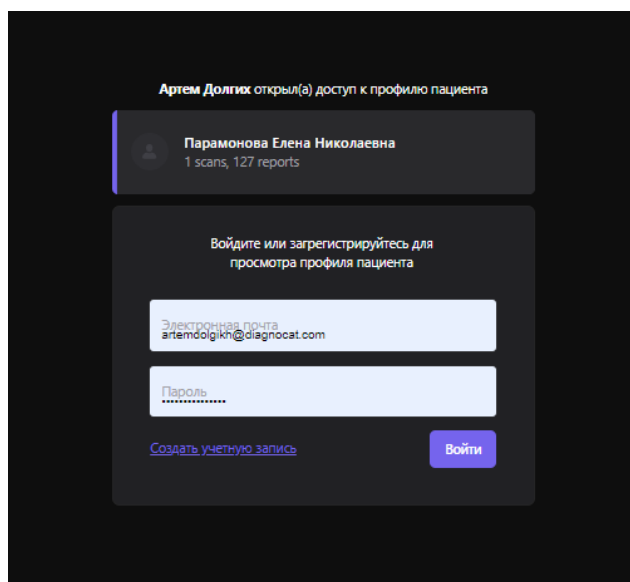

4. Чтобы заказать дополнительные отчеты, Вам нужно уведомить диагностический центр об этом. Все последующие исследования будут появляться в данном личном кабинете. Для входа используйте уже имеющиеся логин и пароль.

!!!ВАЖНО: данный тип аккаунт имеет ограниченный функционал. Вы не можете загружать в такой аккаунт новые исследования и заказывать новые отчеты. Вы можете просматривать и изменять только имеющиеся данные. Если вы хотите получить аккаунт с полным функционалом, то тогда необходимо оставить заявку на почту cat@diagnocat.com или обратиться к территориальному дилеру Diagnocat.